

Questions Fréquemment posées par Docteurs

Quelles sont les contre-indications d'utilisation ?

C'est ce qui rend les **Aligneurs Transparents SLX** très spéciaux. Les aligneurs sont particulièrement clairs par rapport aux autres systèmes d'aligneurs.

Quel est le matériel des aligneurs et gouttières de rétention ?

ClearWear™ est un plastique sans BPA et sans phtalates, qui est fabriqué selon un processus exclusif pour vous offrir un ajustement et une clarté idéale.

Combien de temps faut-il pour recevoir la configuration initiale du traitement proposé ?

La configuration numérique de diagnostic en ligne sera disponible pour révision dans les 5 jours ouvrables suivant la soumission complète des dossiers. (Pour impressions ajoutez 5 jours).

Si le médecin traitant apporte des modifications au plan de traitement proposé, combien de temps faut-il pour recevoir la configuration de traitement modifiée ?

Les configurations modifiées seront livrées dans 2 à 3 jours ouvrables.

Quel est le délai de fabrication des aligneurs ?

Une fois que la configuration du traitement est approuvée, les gouttières seront expédiées dans les 15 à 20 jours ouvrables.

Combien de temps un patient doit-il porter chaque ensemble de gouttières avant de passer à l'étape suivante ?

Si aucune autre technologie d'accélération orthodontique est utilisée, les patients doivent porter leurs gouttières 22 heures par jour, pour environ 2 semaines.

Les empreintes PVS sont-elles acceptées ?

Les empreintes numériques sont la méthode de préférence, mais nous pouvons également accepter les empreintes PVS. (Ajoutez 5 jours pour la collecte des dossiers).

Quels types d'empreintes intra-oraux sont acceptés ?

Nous acceptons tous les principaux empreintes intra-oraux. Les empreintes numériques doivent être soumises en format STL, un format « open source » ; par conséquent, vous n'êtes pas obligé d'acheter un scanner spécifique.

Est-ce que les Aligneurs Transparents SLX sont taillés de façon festonnée ou tout droits ?

Les **Aligneurs Transparents SLX** sont festonnés et coupés le long de la marge gingivale pour assurer le confort optimal du patient.

Qu'est-ce que l'EBT ?

EBT signifie Technique de Bouton Élastique. Votre représentant **Cerum Ortho Organizers** (COO) vous fournira plus d'informations si nécessaire.

Est-ce que les attachements seront recommandés pour une utilisation avec les Aligneurs Transparents SLX ?

Non. Les attachements ne seront recommandés qu'avec l'EBT. Si vous choisissez de placer des attachements, les **Aligneurs Transparents SLX** seront conçus et fabriqués en conséquence pour pouvoir compléter votre plan de traitement.

Est-ce que les Aligneurs Transparents SLX peuvent traiter toutes types de malocclusions ?

Cerum Ortho vous recommande de traiter d'abord les patients de classe II et de classe III avec le **SAGITTAL EN PREMIER/MOTION 3D™** pour établir une occlusion super Class I, avant de passer aux **Aligneurs Transparents SLX**. Cette approche est conçue pour simplifier et standardiser le traitement des Aligneurs **SLX**, réduire la durée totale du traitement ainsi que le nombre d'aligneurs nécessaires.

Que dois-je recommander si les aligneurs prennent du retard ou ne suivent pas ?

Si certaines dents ne suivent pas ou sont en retard, veuillez demander à vos patients d'utiliser des Chewies pour aider à ajuster fermement les aligneurs. Si les dents continuent à tarder et que vous avez besoin d'extrusion, l'EBT peut être nécessaire.

Est-ce que les résultats des Aligner Transparents SLX sont garantis ?

Avec plus de 50 000 patients traités à l'aide de cette technologie innovante d'aligneurs, vous et vos patients pouvez avoir confiance dans les performances des Aligneurs SLX. Cependant, le traitement orthodontique est à la charge du médecin traitant. Cerum Ortho ne peut garantir aucun résultat de traitement orthodontique car les résultats peuvent varier.

Que se passe-t-il si un patient perd un aligneur ?

Demandez aux patients de conserver les aligneurs les plus récemment utilisées et d'utiliser temporairement l'ensemble précédent, pendant que les remplacements soient créés. Les aligneurs de remplacement sont disponibles à l'achat et sont généralement expédiés dans les 10 à 15 jours ouvrables après avoir passé la commande.



Merci de nous contacter pour plus d'informations sur nos produits et offres éducatives :

CERUM ORTHO
Téléphone : 1.800.661.9567
Courriel : info@CerumOrthoAligners.com

Bureaux de Cerum Ortho :
115 – 17th Avenue SO, Calgary, AB T2S0A1