



Questions Fréquemment posées par Patients

Comment les Aligneurs Transparents SLX fonctionnent-ils?

Les **Aligneurs Transparents SLX**® sont une série de plateaux en plastique transparent qui ont été fabriqués spécialement pour vous et se basent sur le scan de vos dents ainsi que les objectifs de traitement que votre médecin a planifié pour votre cas.

Chaque ensemble de plateaux guide doucement vos dents vers leur position idéale en utilisant des forces faibles et continues.

Y a-t-il une raison pour laquelle je ne devrais pas utiliser les Aligneurs Transparents SLX ? Votre candidature pour un traitement orthodontique vient de la décision de votre médecin traitant. Cependant, vous ne devriez pas utiliser les **Aligneurs Transparents SLX** si vous êtes allergique au plastique et/ou n'avez pas toutes vos dents d'adulte.

Est-ce que les aligneurs transparents sont visibles?

C'est ce qui rend les **Aligneurs Transparents SLX** très spéciaux. Les aligneurs sont particulièrement clairs par rapport aux autres systèmes d'aligneurs.

À quelle fréquence dois-je porter mes aligneurs?

Les aligneurs doivent être portés toute la journée et toute la nuit, au moins 22 heures par jour, sauf pendant les repas, le brossage et l'utilisation de la soie dentaire, ou selon les directives de votre médecin.

Quelle est la durée prévue du traitement?

La durée du traitement varie d'un patient à l'autre. Elle varie selon la complexité de votre cas et peut durer quelques mois à quelques années. Votre médecin sera en mesure de vous fournir une estimation du temps.

Comment dois-je nettoyer mes aligneurs?

Utilisez une brosse à dents à poils souples, de l'eau froide ou tiède avec une petite quantité de dentifrice. NE PAS utiliser d'eau chaude. L'eau chaude pourrait provoquer une déformation de l'aligneur. NE PAS utiliser de NETTOYANTS pour prothèses dentaires ou les faire tremper dans du rince-bouche. Ces produits peuvent endommager la surface de l'aligneur, la rendant terne et plus visible.

Est-ce que Cerum Ortho Organizers traite les patients?

Cerum Ortho Organizers fournit des aligneurs sur prescription des dentistes et orthodontistes. Cerum Ortho ne traite pas les patients.

Les résultats des Aligneurs Transparent SLX sont-ils garantis ?

Votre traitement orthodontique est dirigé par et sous la responsabilité de votre médecin. Cerum Ortho ne peut garantir le résultat du traitement orthodontique car les résultats peuvent varier.

Est-ce que j'aurais besoin de porter un appareil de rétention après le traitement ?

Pour prévenir la récurrence des dents, les médecins généralement prescrivent un appareil de rétention après tout traitement orthodontique. Les **Aligneurs Transparents SLX** comprennent un ensemble d'appareils de rétention.

Qu'arrive t'il si je perds un aligneur?

Toujours conserver les aligneurs les plus récemment utilisées (et même l'ensemble précédent) dans un étui/sachet séparé et gardez les dans un endroit sécurisé. Si vous perdez ou cassez votre aligneur actuel, veuillez appeler immédiatement votre médecin traitant. Vous pouvez temporairement revenir une étape en arrière et utiliser l'ensemble d'aligneurs précédents, pour vous assurer que vos dents ne bougent pas pendant que les remplacements sont créés. Les aligneurs de remplacement seront expédiés généralement dans les 10 à 15 jours ouvrables suivant la commande.

Les Aligneurs Transparents SLX sont-ils couverts par les assurances ?

De nombreux régimes de soins dentaires ne couvrent pas les appareils orthodontiques tels que les aligneurs transparents, mais peuvent couvrir une partie du coût total du traitement. Consultez votre médecin ou votre assureur pour plus d'informations.

Est-ce que je peux payer les Aligneurs Transparents SLX avec les assurances?

En général, oui. Les fonds des comptes de dépenses « flex » et des comptes d'épargne santé peuvent être appliqués généralement aux appareils orthodontiques tels que les aligneurs transparents.

Dois-je payer le traitement au début du traitement?

De nombreux médecins proposent des plans de paiement mensuels. Parlez à votre médecin pour vos options de paiement.



Merci de nous contacter pour plus d'informations sur nos produits et offres éducatives :

CERUM ORTHO
Téléphone : 1.800.661.9567
Courriel : info@CerumOrthoAligners.com

Bureaux de Cerum Ortho :
115 – 17th Avenue SO, Calgary, AB T2S0A1

